

Simple DICOM Tools: MediCap

📄 簡単操作でDICOM画像をPACSへ

他院から持ち込まれたCD/DVD/USBなどのPDI形式メディアを、シンプルな操作で院内のPACSへ送信・管理。

🔧 主な機能・特徴

✓ 施設ごとの運用に対応可能な柔軟設定

- 患者IDの桁数制限
- 送信時のモダリティコード指定
- 取り込み対象モダリティの制限
- PACS格納時のstudy名称の指定

✓ 専用端末不要

- 画像サーバーにアクセス可能な端末で動作
- 既存環境にスムーズに導入可能



STEP 1	ドライブ選択 (メディアを選択します)
STEP 2	修正前情報で患者を確認します
STEP 3	送信時の患者IDを入力します
STEP 4	送信時モダリティコードの確認
STEP 5	送信開始

⚠️ ご注意事項

本ツールを使用するには、画像サーバーへのDICOM接続が必要です。
一部の画像サーバーでは、**別途DICOM接続費用**が発生する場合があります。

【Simple DICOM Tools: MediCap】で画像運用のストレスをゼロに。

📞 お問い合わせ

合同会社メディカルベース
公式サイト [http://medicalbase.web.fc2.com]
メール : [medicalbase.llc@gmail.com]